



KBUDEK DİŞ KALİTE KONTROL PROGRAMI

SEDİMENTASYON (ESR) TALİMATI

Dönem: 4

Lot:S2025-1 (SKT: 2025-03)

Lot:S2025-2 (SKT: 2025-06)

Lot:S2025-3 (SKT: 2025-09)

Lot:S2025-4 (SKT: 2025-12)

REF: KBUDESR

Kullanım amacı

KBUDEK Sedimentasyon (ESR) Dış Kalite Kontrol Programı, bu programa katılan her bir laboratuvarın performansını diğer laboratuvarlarla test, yöntem ve cihaz bazında karşılaştırılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Gizlilik

KBUDEK program katılımcılarının gizliliğine büyük önem vermektedir. Her katılımcı sadece kendilerinin ve KBUDEK'in bildiği bir kod ile tanımlanmaktadır. Her bir katılımcıya internet ortamında veri girişi ve incelemesi için, kullanıcı kodu ve şifre tanımlanmaktadır. Kullanıcılar şifrelerini kendileri değiştirebilmektedir.

Testler

Sedimentasyon (ESR) (1. saat)

Güvenlik önlemleri ve uyarılar



UYARI: Biyolojik kaynaklı madde. Potansiyel enfekte materyal.

Donör düzeyinde HIV (HIV 1, HIV 2), Hepatit B Yüzey Antijeni (HBsAg) ve Hepatit C Virüs (HCV) antikoru testleri yapılmış ve negatif bulunmuştur. Ancak hiçbir yöntem enfeksiyöz ajan yokluğu güvencesini tam veremeyeceğinden bu materyal enfeksiyöz hastalık yayabilecek kapasitede olduğu kabul edilerek işlem görmeli ve buna uygun imha edilmelidir.

Örneğin çalışmaya hazırlanması

1- Örneklerin oda ısısına geldiğinden emin olunuz.

2- Dikkatli bir şekilde alt üst ederek dibe çökmüş hücrelerin homojen dağılmasını sağlayınız. Çalkalamayınız, köpük oluşmasına dikkat ediniz.

3- **Vorteks kullanmayınız!**

4- **Örnek homojen dağıldıktan sonra ESR için kullandığınız tüplere gerektiği kadar aktarıp çalışınız.**

Örnekler hasta örnekleri ile aynı şekilde çalışılmalıdır. Mümkünse laboratuvar personelinin haberi olmaksızın günlük süreçler içine alınmalıdır.

Not: Dış Kalite Kontrol Örneklerinin (tekrar sayısı olarak) 1 kez çalışması önerilir.

Saklama koşulları

+18-30°C'de saklayınız.

Dondurmayınız. Aşırı ısı ve güneş ışığından koruyunuz.

Saklanan örnekler tekrar kullanılmadan önce karıştırılmalıdır.

Testlerin çalışma zamanları

Bu program 8 örnekten oluşmaktadır. Ambalajlar **bir yıl içerisinde 4 parti halinde** yollanacaktır. **Her partide 2 örnek bulunacaktır.** Örnekler ait olduğu ay içerisinde aşağıda belirtilen tarihlerde çalışılmalıdır.

Sonuçların gönderilmesi

Sonuçlar en geç ilgili ayın son iş gününe kadar, internet yolu ile www.kbudek.com sitesi üzerinden, sizlere bildirilen kullanıcı kodu ve şifre kullanarak sisteme girilmelidir.

Sonuçların geç gönderilmesi veya değiştirilmesi

Raporlar yayınlandıktan sonra sonuç değişikliği sadece analitik olmayan nedenlerle oluşan hatalar (sulandırma, birim, transkripsiyon, yanlış bir örneği çalışma ve/veya sonucunu iletme) için yapılmaktadır. Geç gönderilen veya değiştirilmiş sonuçlar o aya ait oluşmuş olan ortalama ve standart sapma değerlerini etkilemezler. Zamanında gönderilen sonuçların oluşturmuş olduğu hedef değer ve standart sapmaya göre hesaplamaları yapıp raporları hazırlanır. Raporla sonuçların geç veya düzeltilmiş olduğu bilgisi yer alır.

Dönem kapandıktan sonra gelen geç sonuçlar veya değişiklik talepleri için değerlendirme yapılmayacaktır.

Değerlendirme sonuçlarının izlenmesi

Değerlendirme sonuçları takip eden ayın ikinci haftası içerisinde internette yayınlanmaktadır. Her katılımcı laboratuvar, kendi kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yaparak sadece kendi sonuçlarını görebilecektir. Katılımcılara rapor yayınlandı bilgisi kısa mesaj olarak gönderilir.

Cihaz veya yöntem değişiklikleri

Programın devam ettiği süre içerisinde katılımcı laboratuvarın kullandığı cihaz, yöntem, birim veya diğer değişiklikler internet sitesi üzerinden güncellenmelidir. Programda değerlendirilen güncel testler ve yöntemler için www.kbudek.com sitesinde yayınlanmakta olan program talimatına bakınız.

Kutu içerisinde sağlanan materyal:

Sedimentasyon (ESR) kontrol örnekleri- 2 şişe – 2 ml

Çalışma ayları	Örnek numarası	Önerilen çalışma tarihi	Sonuç girişi için son tarihi
Şubat	1.Örnek	27.02.2025	28.02.2025
Mayıs	2.Örnek	28.05.2025	31.05.2025
Ağustos	3.Örnek	28.08.2025	31.08.2025
Kasım	4.Örnek	28.11.2025	30.11.2025

İletişim

Klinik Biyokimya Uzmanlar Derneği (KBUD) İktisadi İşletmesi

Maslak Mah. Ahi Evran Cad. 42 Maslak A2 blok K9 D7
Sarıyer-İstanbul

Tel: 212 2412653/ 212 2412616/ 212 2412657

Fax: 212 2412654

www.kbudek.com; destek@kbudek.com



KBUDEK
DIŞ KALİTE KONTROL PROGRAMI

SEDİMENTASYON (ESR) TALİMATI

Dönem: 4

Lot:S2025-1 (SKT: 2025-03)

Lot:S2025-2 (SKT: 2025-06)

Lot:S2025-3 (SKT: 2025-09)

Lot:S2025-4 (SKT: 2025-12)

REF: KBUDES

KULLANILAN YÖNTEM VE CİHAZLAR	
Otomatik	THERMA LINEAR ALARİS ALS 20 VACUETTE YHLO VISION A YHLO VISION B GREİNER BİO ONE/ SED RATE SCREENER 100 TRUE LINE ELECTA LAB MIXRATEX 100 DİESSE CUBE 30 TOUCH